

## Provtagning och skicka blodprov för Harmony NIPT, performed in Sweden.

### 1. Elektronisk remiss.

Helst ser vi att det elektroniska systemet för remisser och svarsrapporter används.

Logga in på

<https://login.sv.fostertest.se/Account/Login.aspx>

Fyll i patientinformation. Spara. Skriv ut remissen inklusive samtycke. Både patient och remittent ska signera remissen. Lägg remissen tillsammans med blodprovsrören i provtagningskitet.

När svaret är klart kommer e-mail om detta. Logga in i det elektroniska systemet och ladda ner svaret. Vid avvikande svar kontaktas ni via telefon för att diskutera fallet.

Svarstid för närvarande är normalt 4-9 arbetsdagar.

### 2. Pappersremiss

Möjligheten finns att använda pappersremiss och få papperssvar på posten.

### 3. Ta blodprov

Ta 2 rör av perifert venöst blod (helblod) från den gravida kvinnan i cell-free DNA, Roche-rör (8,5 ml, vakuum-rör, Cell-Free DNA Collection Tube, Ref.nr. 07785666001). Blanda blodet försiktigt genom att invertera det några gånger. Förvara blodet i rumstemperatur (6-35°C). Inga pre-analytiska krav finns på patienten.

Skriv patientens namn och födelsedata på rören, kontrollera att remissID och streckkoder på rören stämmer. Fastställ identiteten av patienten med legitimation.

(Minst ett helt fyllt rör eller 3 halvfyllda rör behövs för att analysen ska kunna utföras.)

Ta hand om smittförande, stickande, skärande avfall enligt lokala rutiner.

### 4. Att förpacka blodprovet

Lägg tillbaka rören i provtagningskitet så som de kommer, tillsammans med den signerade remissen. Placera provtagningskitet i ett vadderat kuvert. Flera kit kan placeras i ett vadderat kuvert. Placera returfraktsedeln på det vadderade kuvertet. Förslut ordentligt med häftklammar eller tejp.

### 5. Transport av blodprovet till Life Genomics

Skicka helst proverna samma dag som de tas. Undvik att skicka prover på fredagar – förvara proverna i rumstemperatur under helgen och skicka dem på måndagen. Proverna är hållbara i 7 dagar i rumstemperatur. Meddela spårningsnumret till Life Genomics antingen via e-remissen eller e-mail till [info@lifegenomics.se](mailto:info@lifegenomics.se)

## 6. Boka upphämtning

Transport sker med PostNord.

Upphämtning bokas på 0771-33 33 10, eller gå in på

<http://www.postnord.se/sv/foretag/skicka/boka/Sidor/boka-hamtning.aspx> . Ange val för Hämtning #1, sedan #1. Tryck in ditt riktnummer #, kundnummer 20662564#. Ange din upphämtningsadress samt mottagarens adress:

Life Genomics  
Att: Eva Arkblad  
Odinsgatan 28  
411 03 Göteborg  
Tel: 0708-58 33 72

OBSERVERA att ni måste finnas tillgängliga på adressen för upphämtning efter att upphämtningen bokats.

Det går även bra att lämna paketet hos PostNords (Postens) ombud. Observera vilken tid du senast måste lämna in ditt paket hos ditt ombud för att komma med dagens post.

### Följande tillhandahålls av Life Genomics:

Provtagningskit med 2 st Roche cell-free DNA rör (plast).

Emballage för att skicka proverna.

Returfraktsedlar med PostNord.

Patientinformation och broschyrer.

Inloggningsuppgifter till elektroniskt system för remiss och svar.

Life Genomics har öppet helgfria vardagar kl 8-16 men svarar ofta i telefon även utanför dessa tider.

För att acceptera blodprover för analys med Harmony NIPT behöver proverna vara märkta med ID och åtföljas av antingen elektronisk eller pappersremiss samt komma laboratoriet tillhanda inom 7 dagar från provtagningen. Om prov ej uppfyller kraven för att accepteras kontaktas inremitterande. Hemolys medför minskning av den fetala andelen och vid starkt hemolyserade prover kontaktas inremitterande som ges möjlighet att ta ett nytt prov. Prover tagna i Roche cell-free DNA och i Streck cf-DNA rör accepteras.

Tillgång till rådgivning beträffande beställningar och tolkning av resultat finns på [info@lifegenomics.se](mailto:info@lifegenomics.se) och telefon 0708583372. Eventuella klagomål eller förbättringsförslag delges oss på samma sätt och hanteras hos oss enligt våra rutiner för avvikelser.

Personuppgiftspolicy återfinns på: <http://www.lifegenomics.se/om-oss/personuppgiftspolicy/>